

## INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL- SURTO DOENÇA DIARREICA POR VIRUS

### Instrução: Coleta, Transporte e Envio de Amostras ao LACEN/CEVS/SES – RS

#### PESQUISA DISPONÍVEL NO GAL : Rotavírus - Norovírus

**TIPO DE AMOSTRA:** Fezes “in natura” 4 a 8 gramas de fezes, equivalente a dois dedos polegares. Coletar de 3 a 5 amostras com critérios de sintomas, entre os pacientes relacionados ao surto.

Rota / Noro ( até 5 dias do início dos sintomas no máximo 8º dia )

**ACONDICIONAMENTO:** Pote de plástico rígido tampa de rosca bem fechados. Manter de 4ºa 8ºC.

**IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:** Nome na amostra tem que ser igual ao do GAL.  
Os potes com amostras de fezes devem ser etiquetados no corpo, nunca na tampa.  
Identificar o frasco contendo o material: Nome Paciente, Data da Coleta, Material(fezes), Município e Agravo.

**TRANSPORTE:** Enviar o mais rápido possível. No máximo até 5 dias. Caixa térmica com gelo reciclável. Com a ficha do GAL corretamente preenchida.

#### CADASTRO NO GAL

A **requisição no GAL** para Investigação Surto Doença Diarréica deve ser feita de acordo com os dados da investigação, sinais e sintomas da doença, situação epidemiológica, na rede do LACEN da seguinte maneira:

Finalidade = **Investigação**

Descrição = **Doença de transmissão hídrica e alimentar**

Agravo: **DOENÇAS DIARRÉICAS/GASTROENTERITE**

Caso: **Surto**

Pesquisa: **Rotavírus – Norovírus**

**Imprimir a requisição**

**Entrar na triagem e encaminhar para rede**